





Kontrola procesów oczyszczania i dezynfekcji

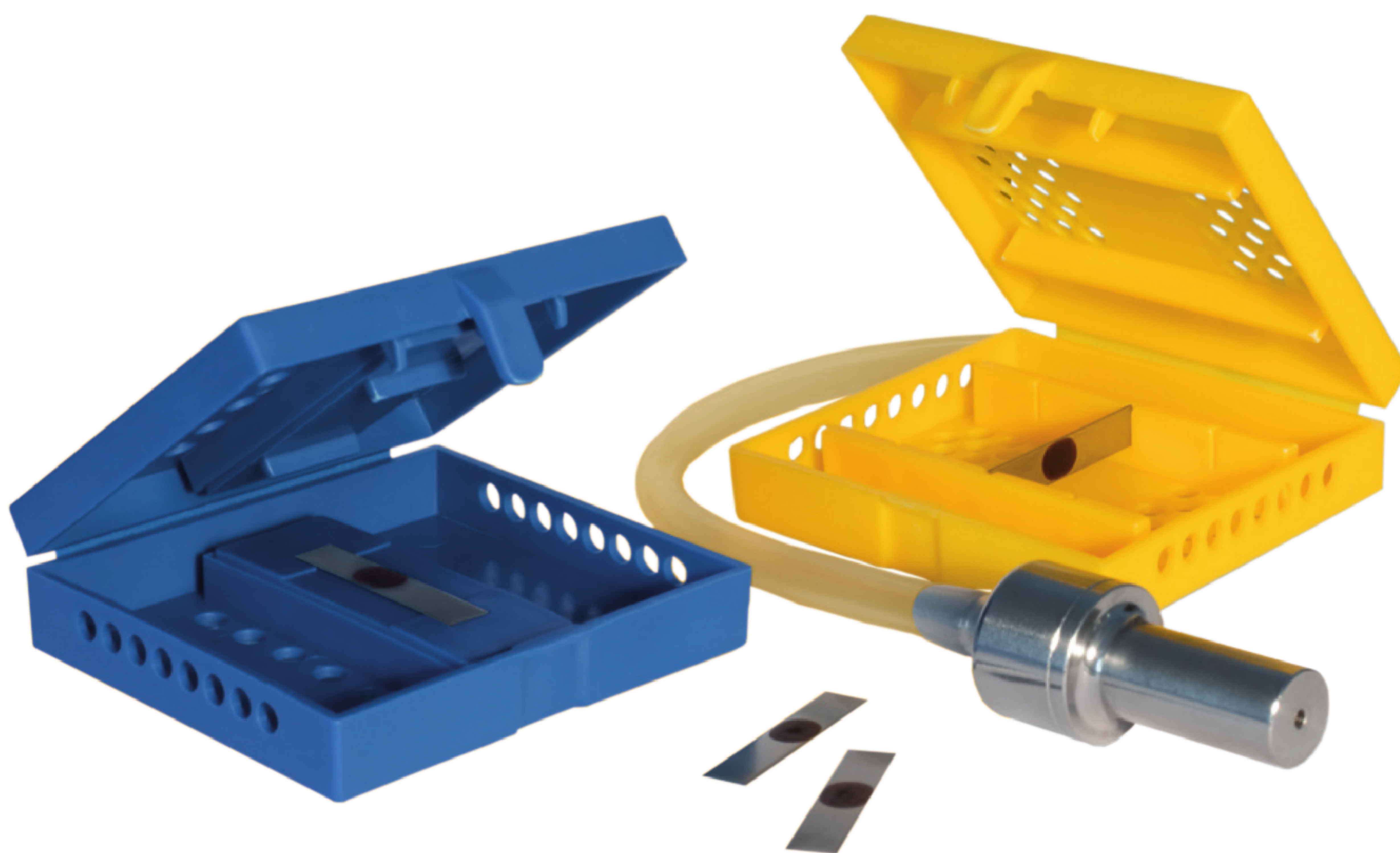

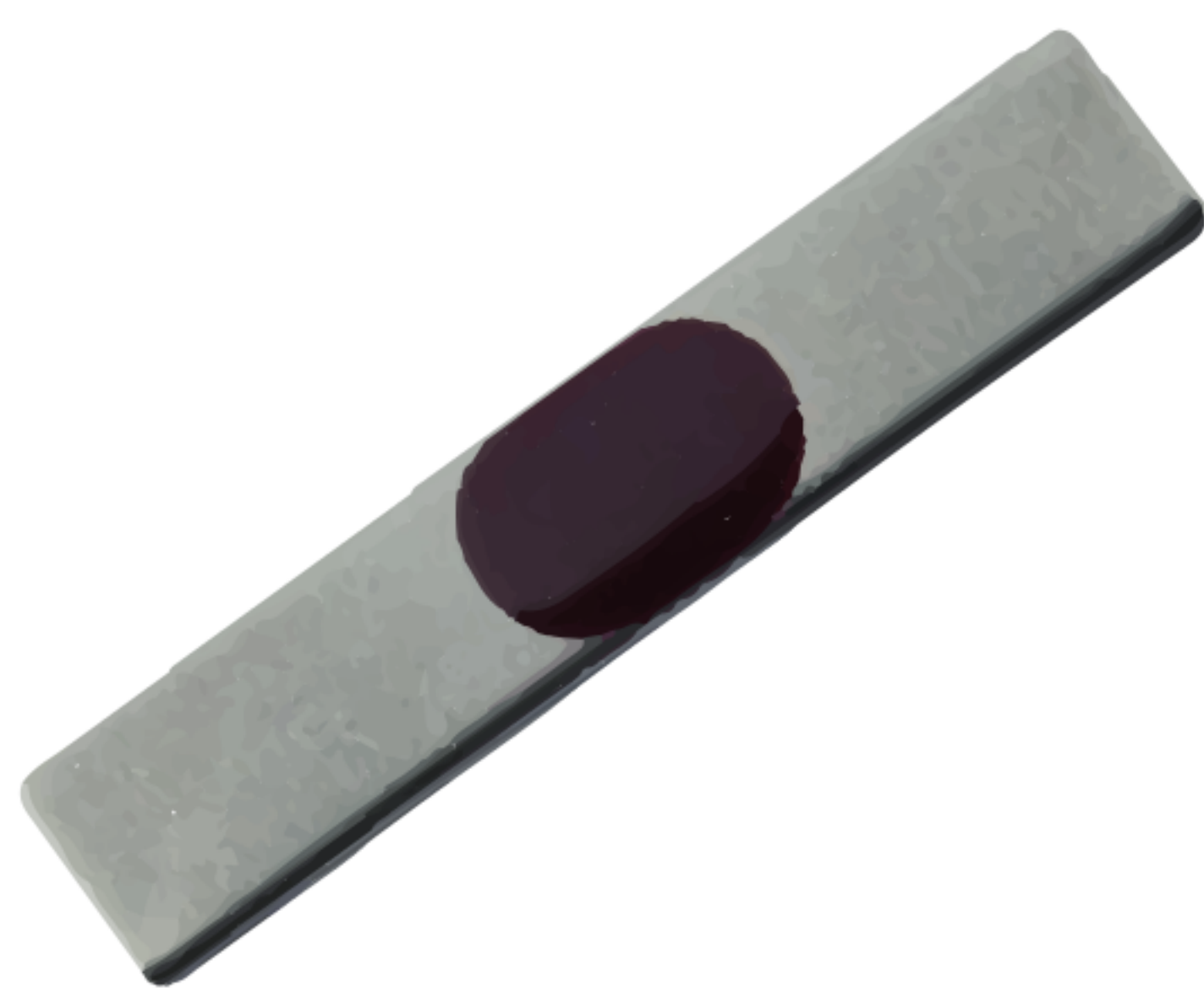

Testy do kontroli skuteczności mycia SIMICON RI

Test do kontroli skuteczności mycia SIMICON RI służy do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych.

W zależności od zastosowanego przyrządu testowego można symulować mycie narzędzi chirurgicznych, narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej i endoskopy elastyczne.

Test SIMICON RI jest wskaźnikiem zbudowanym z nośnika w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną substancją symulującą krew ludzką, zgodnie z normą PN-EN ISO 15883, który umieszcza się w specjalnie do tego przeznaczonym przyrządzie testowym procesu PCD.

Kontrola skuteczności mycia narzędzi chirurgicznych

Przyrządy testowe procesu PCD do kontroli skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych dla narzędzi chirurgicznych

Wykonany ze stali kwasoodpornej.
Do stosowania z testem do kontroli skuteczności mycia SIMICON RI, zgodny z normą PN-EN ISO 15883.
Symulacja litych narzędzi chirurgicznych.



Wykonany z tworzywa sztucznego.
Do stosowania z testem do kontroli skuteczności mycia SIMICON RI, zgodny z normą PN-EN ISO 15883.
Symulacja litych narzędzi chirurgicznych.



Wykonany z tworzywa sztucznego.
Do stosowania z testem do kontroli skuteczności mycia SIMICON RI, zgodny z normą PN-EN ISO 15883.
Symulacja litych narzędzi chirurgicznych oraz narzędzi chirurgicznych z trudno dostępnymi powierzchniami np. narzędzia z zawiasami.



Płytkę z siatki ze stali kwasoodpornej (obciążnik) do mocowania przyrządu testowego procesu PCD z tworzywa sztucznego nr kat. RI-52003-PPY-E i RI-52003-PPB-E.



Kontrola skuteczności mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej

Przyrząd testowy procesu PCD do kontroli skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach dla narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej

Kapsuła wykonana ze stali kwasoodpornej lub poliwęglanu (PC) z silikonową rurką, zakończoną złączem Luer-Lock. Do stosowania z testem do kontroli skuteczności mycia SIMICON RI.



Nr katalogowy	Nazwa handlowa	Opakowanie
RI-52002-E	Test do kontroli skuteczności mycia SIMICON RI	50 szt.
RI-52003-V2A-E	Przyrząd testowy procesu PCD ze stali kwasoodpornej dla litych narzędzi chirurgicznych	1 szt.
RI-52003-PPY-E	Przyrząd testowy procesu PCD z tworzywa sztucznego dla litych narzędzi chirurgicznych, żółty	5 szt.
RI-52003-PPB-E	Przyrząd testowy procesu PCD z tworzywa sztucznego dla litych narzędzi chirurgicznych, w tym z trudno dostępnymi powierzchniami, niebieski	5 szt.
RI-52009-E	Płytkę (obciążnik) do mocowania przyrządu testowego procesu PCD RI-52003-PPY-E i RI-52003-PPB-E	1 szt.
RI-52004-PMIC-PC-E	Przyrząd testowy procesu PCD z kapsułą z poliwęglanu (PC) dla narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej	1 szt.
RI-52004-PMIC-V2A-E	Przyrząd testowy procesu PCD z kapsułą ze stali kwasoodpornej dla narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej	1 szt.
RI-52006-SET-E	Zestaw do kontroli skuteczności mycia: 50 szt. testów SIMICON RI, 1 przyrząd RI-52003-PPY-E, 1 przyrząd RI-52003-PPB-E, 1 przyrząd RI-52004-PMIC-PC-E	1 zestaw

Kontrola skuteczności mycia endoskopów elastycznych

Przyrządy testowe procesu PCD do kontroli skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach dla endoskopów elastycznych

Średnica 1 mm, długość 2 m

Kapsuła wykonana z polipropylenu (PP) z teflonową rurką, zakończoną złączem Leur-Lock, zgodny z normą PN-EN ISO 15883.

Do stosowania z testem skuteczności mycia SIMICON RI i EF.



Średnica 2 mm, długość 2 m

Kapsuła wykonana z poliwęglanu (PC) z teflonową rurką, zakończoną złączem Leur-Lock, zgodny z normą PN-EN ISO 15883.

Do stosowania z testem skuteczności mycia SIMICON RI i EF.

Złącza do przyrządów testowych PCD nr kat. PM-RIBI-1 i PM-RIBI-2 dla myjni-dezynfektorów do endoskopów elastycznych

Zestaw złączy dla myjni-dezynfektorów firmy Belimed i BHT z komorą ciśnieniową do endoskopów elastycznych

Złącze dla myjni-dezynfektorów firmy Olympus do endoskopów elastycznych (model ETD, ETD2, ETD3)

Złącze dla myjni-dezynfektorów firmy Belimed z systemem kontroli mycia kanałów endoskopów elastycznych



Nr katalogowy	Nazwa handlowa	Opakowanie
PM-RIBI-1-PP-E	Przyrząd testowy procesu PCD z kapsułą z polipropylenu (PP) dla endoskopów elastycznych, średnica 1 mm	1 szt.
PM-RIBI-2-PC-E	Przyrząd testowy procesu PCD z kapsułą z poliwęglanu (PC) dla endoskopów elastycznych, średnica 2 mm	1 szt.
RI-52010-ENDO-SET-E	Zestaw do kontroli skuteczności mycia endoskopów elastycznych: 50 szt. testów SIMICON RI, 1 przyrząd PM-RIBI-1-PP-E lub 1 przyrząd PM-RIBI-2-PC-E	1 zestaw
PM-RIBI-BB-E	Zestaw złączy dla myjni-dezynfektorów firmy Belimed i BHT z komorą ciśnieniową do endoskopów elastycznych	1 zestaw
PM-RIBI-OLY-E	Złącze dla myjni-dezynfektorów firmy Olympus do endoskopów elastycznych	1 szt.
PM-RIBI-BEL-E	Złącze dla myjni-dezynfektorów firmy Belimed z systemem kontroli kanałów endoskopów elastycznych	1 szt.

Kontrola procesów dezynfekcji termicznej i chemiczno-termicznej

Wskaźnik biologiczny SIMICON TD do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w temperaturze od 70°C do 95°C

Służy do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności procesów mycia i dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w temperaturze od 70°C do 95°C.

Wskaźnik SIMICON TD zawiera populację *Enterococcus faecium* (10^7) oraz zabrudzenie testowe zgodne z normą PN-EN ISO 15883. Inkubacja 4 dni w 35°C.



Wskaźnik biologiczny SIMICON CTD do kontroli procesów dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze od 55°C do 70°C

Służy do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności procesów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni-dezynfektorze w temperaturze od 55°C do 70°C.

Wskaźnik SIMICON CTD zawiera populację *Enterococcus faecium* (10^5) oraz zabrudzenie testowe zgodne z normą PN-EN ISO 15883. Inkubacja 4 dni w 35°C.



Uchwyt do mocowania wskaźników biologicznych SIMICON TD i CTD do kontroli procesów dezynfekcji

Nr katalogowy	Nazwa handlowa	Opakowanie
BI-TD-12001-E	Wskaźnik biologiczny SIMICON TD	10 szt.
BI-CTD-13001-E	Wskaźnik biologiczny SIMICON CTD	10 szt.
SH-21201-E	Uchwyt do mocowania wskaźników biologicznych TD i CTD	5 szt.

Wskaźnik biologiczny SIMICON TEX do kontroli procesów dezynfekcji termicznej tekstyliów

Służy do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności procesów mycia i dezynfekcji termicznej w pralnicach do tekstyliów.

Wskaźnik SIMICON TEX zawiera populację *Enterococcus faecium* (10^7) oraz zabrudzenie testowe zgodne z normą PN-EN ISO 15883.

Wskaźnik SIMICON TEX spełnia wymagania DGHM, RKI i VAH.

Inkubacja 4 dni w 35°C.



Kontrola mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych

Wskaźnik biologiczny SIMICON EF do kontroli procesów mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych

Służy do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności procesów mycia i dezynfekcji (do 35°C) kanałów endoskopów elastycznych.

Wskaźnik SIMICON EF zbudowany jest z płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną populacją *Enterococcus faecium* (10^9) oraz zabrudzenia testowego zgodnego z normą PN-EN ISO 15883-5. Wskaźnik umieszcza się w specjalnie do tego przeznaczonym rurowym przyrządzie testowym PCD, symulującym kanał endoskopu elastycznego.

Inkubacja 4 dni w 35°C.



Nr katalogowy	Nazwa handlowa	Opakowanie
BI-TEX-15001-E	Wskaźnik biologiczny SIMICON TEX	10 szt.
BI-EF-14051-E	Wskaźnik biologiczny SIMICON EF	10 szt.

Kontrola dezynfekcji parą wodną

Wskaźnik biologiczny SIMICON DE do kontroli procesów dezynfekcji parą wodną w 75°C - 20 min i 105°C - 1 min

Służy do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności procesów dezynfekcji termicznej w komorach dezynfekcyjnych w 75°C - 20 min i 105°C - 1 min, odpowiednio dla zakresu A, B.

Wskaźnik SIMICON DE zawiera populację *Enterococcus faecium* (10^6) i jest zgodny z wymaganiami zawartymi w DIN 58949-4. Inkubacja 7 dni w 35°C.




Wskaźnik biologiczny SIMICON DS do kontroli procesów dezynfekcji parą wodną w 105°C - 5 min

Służy do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności procesów dezynfekcji termicznej w komorach dezynfekcyjnych w 105°C - 5 min, odpowiednio dla zakresu A, B, C.

Wskaźnik SIMICON DS zawiera populację *Bacillus atrophaeus* (10^5) i jest zgodny z wymaganiami zawartymi w DIN 58949-4. Inkubacja 7 dni w 33°C.



Nr katalogowy	Nazwa handlowa	Opakowanie
BI-DE-11001-E	Wskaźnik biologiczny SIMICON DE	50 szt.
BI-DS-10001-E	Wskaźnik biologiczny SIMICON DS	50 szt.

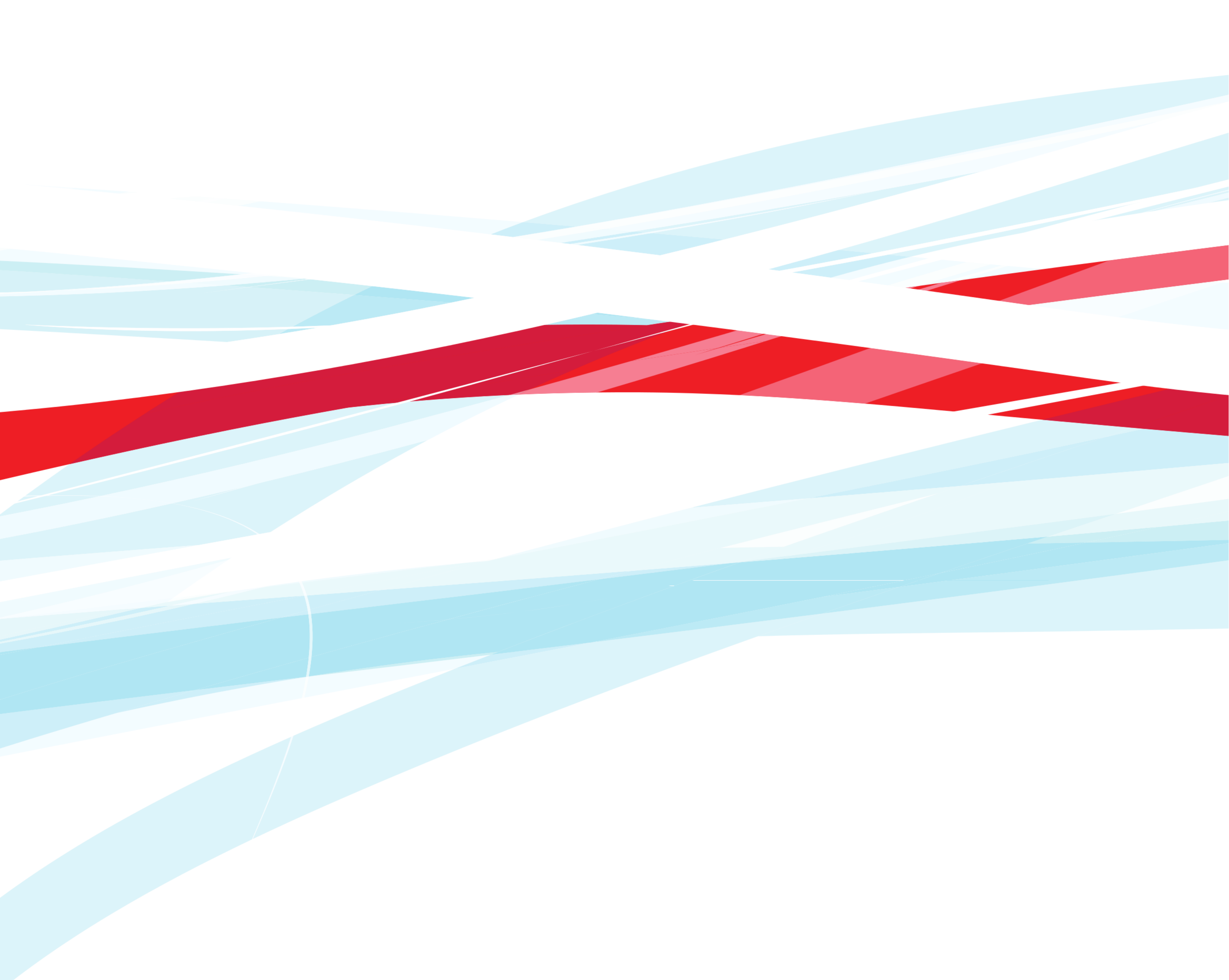

AMED Biuro Techniczno - Handlowe
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn
tel. 22 715 71 86 do 89
fax 22 715 71 90
e-mail: biuro@amed.pl
www.amed.pl

